

Fisher-Price

Extrator de leite elétrico

manual de instruções

BB320

versão: 04/2018



Atenção: antes da utilização, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

INDÍCE

AVISOS IMPORTANTES	4
1. CONHECENDO O PRODUTO	6
2. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA	7
3. MONTAGEM.....	8
4. UTILIZAÇÃO DA BOMBA	12
5. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	13
6. ARMAZENAMENTO DO SEU LEITE	14
7. ADVERTÊNCIAS.....	14
8. GARANTIA.....	17



AVISOS IMPORTANTES

Informações Importantes de Segurança

O Extrator de Leite Elétrico da Fisher-Price é um item pessoal e, por razões de higiene, não deve ser compartilhada com outras mães ou revendida de uma para outra. Ao usar produtos elétricos, principalmente na presença de crianças, precauções básicas de segurança devem ser sempre mantidas, como:

Leia Todas as Instruções Antes de Utilizar o Produto



Perigo! Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retire sempre o produto da tomada imediatamente após o uso.
- Não use durante o banho.
- Não coloque nem guarde este produto onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
- Não coloque nem deixe cair a Bomba em água ou outro líquido.
- Não segure um aparelho elétrico que tenha caído na água. Retire-o da tomada imediatamente.
- Utilize o aparelho apenas em ambientes secos. Evite seu uso em ambientes úmidos ou molhados.



Aviso! Para reduzir o risco de acidentes:


- Este produto jamais deve ser deixado sozinho enquanto estiver na tomada.
- Preste especial atenção quando este proBB3205V/1AAperte o botãomodo de controleSaída Saída de arCabo USBAdaptador ACMonitor de controleTubo de sucção?VálvulaCorpo da bombadiafragmaTampa do diafragmaAlmofadasTampa protetora LCDDisplay Modelo ricante e nem modifique o equipamento.
- Nunca use este produto se ele tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou caído na água.

- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Nunca use enquanto dorme ou quando estiver sonolenta.
- Nunca deixe cair nem insira objetos em aberturas ou no tubo de sucção.
- Não use este produto se estiver quebrado ou se estiver faltando alguma peça.
- Não permita que crianças pequenas ou animais de estimação brinquem com a unidade de bomba, com o adaptador AC, com os cabos ou mangueiras e com peças pequenas por risco de choque, estrangulamento ou deglutição/inalação.
- Não use em áreas externas com o adaptador AC nem em locais onde sprays aerossóis estiverem sendo usados ou onde oxigênio estiver sendo administrado.
- Fique atenta e utilize o aparelho com atenção, evitando confusões na operação.
- Cuidado com alterações nos controles, movimentos inesperados, operação inadequada ou não segura e alterações na transferência de energia.

IMPORTANTE

- Antes de utilizar o Extrator de Leite Elétrico Fisher-Price verifique se suas mãos e seus seios estão limpos.
- Nunca utilize o Extrator de Leite Elétrico Fisher-Price sem sua devida esterilização

1. CONHECENDO O PRODUTO

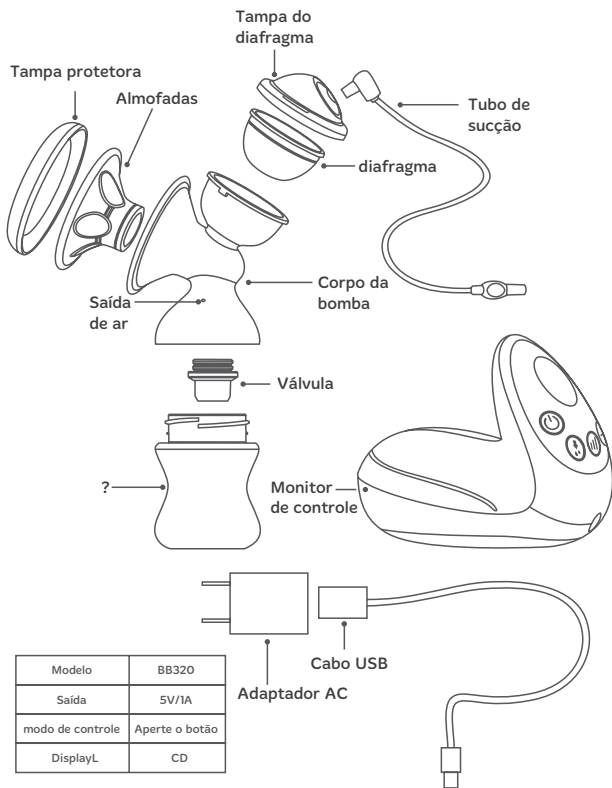

2. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA



ATENÇÃO:

nunca lave ou esterilize a bomba de sucção. Para sua limpeza, use apenas um pano úmido. Nunca use produtos químicos e/ou corrosivos.

A menos que seja instruído de outra forma por seu médico, siga as instruções de limpeza abaixo:

2.1 Antes do Primeiro Uso – Esterilização

1. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, desmonte e ferva por 10 minutos todas as peças do Kit de Extração que irão entrar em contato com o leite materno.

- Certifique-se de utilizar água suficiente para manter as peças boiando enquanto são fervidas.
- Não lave e não ferva o tubo e o conector do tubo. O extrator Elétrico Fisher-Price possui um design higiênico com sistema fechado, que garante que o leite materno não entrará no tubo ou no motor.

2. Remova todas as peças da água imediatamente após a fervura. Tenha bastante cuidado já que as peças estarão quentes.

3. Deixe secar completamente antes de montar e utilizar. Peças parcialmente secas podem afetar o funcionamento da bomba.

2.2 Limpeza

- Separe o tubo e o conector do tubo. Estes itens não precisam ser lavados ou esterilizados, pois o diafragma impede que eles entrem em contato com o leite materno.

- A flange e o frasco podem ser colocados na prateleira superior de sua lava louças ou ser lavada a mão com detergente e água quente. Para melhores resultados, você pode utilizar uma escova de mamadeira para limpar o frasco, e uma escova de bico para limpar dentro da flange. NÃO utilize solventes ou abrasivos. Enxague com água limpa e quente.

- Todas as outras partes do Kit de Extração devem ser lavadas a mão para prevenir danos e estender sua utilidade.


Para limpar a base de sua Bomba, passe um pano úmido somente com água ou sabão neutro.

2.3 Antes de Cada Uso


- Sempre lave suas mãos com água e sabão antes de manusear o Kit de Extração, o corpo da Bomba e outras partes.
- Garanta que o tubo esteja livre de qualquer líquido ou umidade. Não utilize a Bomba se houver líquido ou umidade visíveis no tubo.
- Certifique-se de que o diafragma esteja completamente seco antes do uso.
- Antes de cada uso, faça uma inspeção visual de cada parte para garantir que não haja rachaduras, rasgos, descolorações ou deterioração, já que isso pode afetar a funcionalidade do Kit de Extração. Para outras orientações e peças de reposição, entre em contato com nosso SAC através do telefone.

3 MONTAGEM

3.1. Insira a válvula na parte de baixo do corpo da bomba e aperte-o para evitar vazamento de ar.

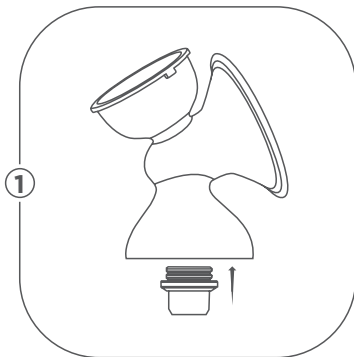

3.2 Em seguida, encaixe o frasco e gire-o no sentido horário .

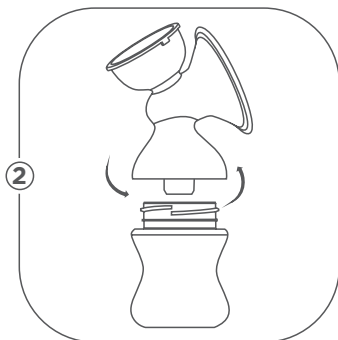

3.3 Coloque o diafragma na parte superior da bomba e certifique-se de que está cobrindo todas as bordas.



3.4 Coloque a tampa sobre o diafragma e gire no sentido horário, até que esteja bem encaixada.



3.5 Insira a almofada e certifique-se de não deixar nenhum espaço.



♥ EXTRATOR DE LEITE ELÉTRICO

3.6 Use o tubo de sucção para conectar o monitor de controle com a bomba.



4. UTILIZAÇÃO DA BOMBA

4.1 Massagem:


A função massagem simula a sucção do bebê, de maneira rápida, porém suave.

Antes de usar a função Sucção, use o modo massagem.

Acione o modo massagem, pressionando o botão **"MODO"**. Utilize os botões "+" ou "-" para regular o nível de intensidade conforme desejado.

É possível escolher 1 dos 10 níveis de intensidade disponíveis.

Pressione o botão de frequência para ajustar em 1 dos 3 níveis, conforme desejado

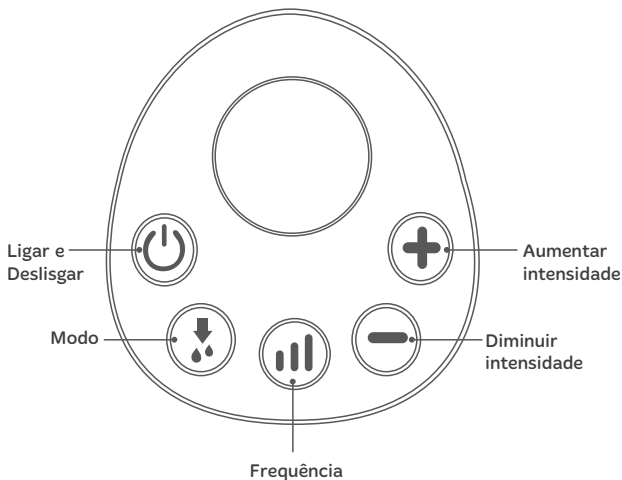

4.2 Sucção

Altere para o modo sucção, pressionando o botão **"MODO"**.

Selecione a intensidade de sucção e frequência, conforme indicado no tópico anterior.

4.3 Memória

A função memória registra o modo em que a bomba foi utilizada da última vez, incluindo o nível de intensidade e frequência.

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

• Sem sucção

- 1- Verifique se a válvula, diafragma, tampa e tubo de sucção estão devidamente encaixados;
- 2- Verifique se há algum desgaste nas partes;
- 3- Se não foi possível liga-la, verifique a fonte de energia.

• Baixa sucção

- 1 – Primeiro cheque o problema apontado anteriormente;
 - 2 – A bomba oferece 15 diferentes níveis de intensidade de sucção, sendo o máximo de 45KPa (normalmente a intensidade de sucção do bebê é 20-30KPa).
- A intensidade de sucção ideal para cada mãe pode ser encontrada aumentando lentamente o nível até o mais adequado, de modo que a sucção seja suave e sem dor.
- Níveis de sucção muito altos podem causar desconforto.

• Sucção lenta

A velocidade em que o leite materno é extraído pode sofrer variação de mulher para mulher, além disso, outros fatores podem influenciar, como: estrutura do seio, nível de obstrução, humor.

Com o uso contínuo da bomba, a extração se tornará mais confortável.

Antes de usar a bomba, faça uma compressa no seio com uma toalha quente e utilize o modo "massagem" por 5 minutos. Depois inicie a sucção

• Dor nos seios



ATENÇÃO:

Em caso de dor no seio, pare a utilização imediatamente.

Verifique o nível de sucção do produto. Você pode ter escolhido um nível muito forte para você. Se após a redução do nível de sucção a dor ainda continuar, consulte o seu médico.

6. ARMAZENAMENTO DO SEU LEITE

- O leite materno pode ser armazenado na geladeira ou no congelador em frascos para leite materno esterilizados.
- Não encha demais o recipiente e certifique-se que esteja bem posicionado para evitar derramamento.
- O leite extraído deve ser refrigerado imediatamente, em frascos para leite materno (vendido separadamente).
- Só deve ser dado ao bebê, o leite extraído com uma bomba esterilizada.
- O leite materno pode ser armazenado na geladeira durante 48 horas (não na porta) ou no congelador até 3 meses.
- O leite materno deve ser descongelado gradualmente em água quente ou aquecido no Aquecedor Digital de Mamadeira Fisher-Price (vendido separadamente).

ATENÇÃO:

NUNCA congele pela segunda vez o leite materno; **NUNCA** adicione leite materno fresco ao leite já congelado.

7. ADVERTÊNCIAS

- O equipamento eletromédico necessita de cuidados especiais relacionadas à EMC (compatibilidade eletromagnética).
- Equipamentos de radio frequência podem afetar equipamentos eletromédicos.
- A seguir, diretrizes sobre a EMC devem ser observadas durante a instalação e operação do equipamento.
- Este dispositivo não deve ser usado em locais com alta interferência eletromagnética.
- Se o dispositivo não funcionar corretamente devido a interferência eletromagnética, siga instruções no manual “Resolução de problemas”. Se ainda não puder ser recuperado, por favor, pare de usá-lo.
- O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação incorreta. Se tal uso for necessário, este equipamento e o outro equipamento deve ser observado para verificar se eles estão operando normalmente.
- O cabo utilizado no BB320 é inferior a 3 m.
- ADVERTÊNCIA: Utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento de emissões eletromagnéticas ou imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.

ATENÇÃO

Equipamento de comunicação RF portátil (incluindo periféricos como cabos de antena antenas

externas) deve ser usado a não mais de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do BB320, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, a degradação do desempenho deste equipamento poderia resultar.

- As características das EMISSÕES deste equipamento permitem a sua utilização em ambientes residenciais.

8. GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas na troca de produtos com defeitos de fabricação, desde que tenha sido utilizado corretamente.



www.multikidsbaby.com.br

SAC: www.multilaser.com.br.

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial para
(0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).

Fabricado na China

Importado por: Multilaser Industrial S.A

CNPJ: 59.717.553/0006-17

The Fisher-Price logo is displayed in white text on a red, scalloped-edged background. The word 'Fisher-Price' is written in a classic serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right of the word 'Price'.

FISHER-PRICE e marcas associadas são de propriedade de Mattel e usados sob
licença de Mattel Europa B.V. © 2019 Mattel. Todos os
All Rights Reserved. FISHER-PRICE e marcas associadas são de propriedade de Mattel
e usados sob licença de Mattel Europa B.V. © 2019 Mattel. Direitos Reservados.